


A bábu egyes testrészein található számozás jelentése és az egyes testrészekhez kapcsolódó betegségek rövid leírása

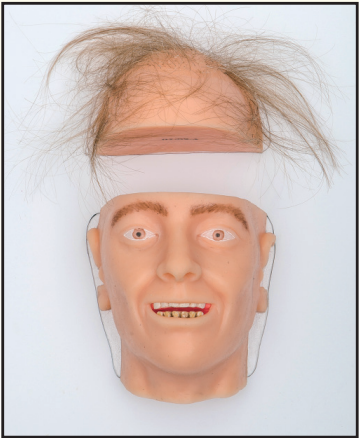

01-01
fejtető/egészséges (hajas)



01-02-a
fejtető/beteg (kopaszodó)
Hajhullás:

A dohányzás gyengíti az immunrendszert, ezáltal a szervezet sérülékenyebb betegségekkel szemben, valamint vitaminhiányhoz vezet, amely hajhullást okozhat.




01-03-b
fej (alsó fogsornál:
fog- és íny betegség a szájban)
Fog- és íny betegség:

A dohányzás megváltoztatja a száj kémiai folyamatait, ami fogkőlerakodáshoz és fogszuvasodáshoz vezethet. Ennél súlyosabb probléma, hogy a dohányzás foghullást is eredményezhet: tíz év alatt a nagy dohányosok (naponta egy dobozt fogyasztók) átlagban három, a friss dohányosok 2,4, míg a nemdohányzók csupán 1,3 fogat veszítenek.




01-04-c/i
szem/beteg (1 db szürkehályog
+ráncosodó szemkörnyék protézis)
Szürke hályog:

A szem egyik leggyakoribb betegsége a szürkehályog, mely műtét nélkül vaksághoz vezet. Az életkor előrehaladtával a betegség kialakulásának kockázata folyamatosan nő, ám a dohányzóknál a szürkehályog az átlagnál is jóval nagyobb eséllyel fordul elő. Napi húsz (egy doboz) vagy több cigarettát szívó dohányosoknál a betegség már kétszer gyakrabban alakul ki.

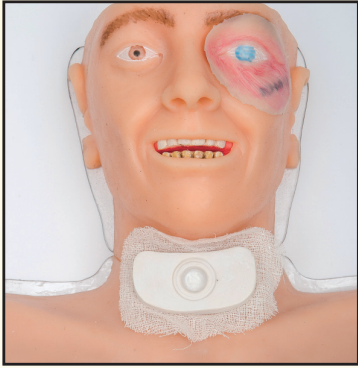


01-05-d
légcső/beteg
(1 db légcsőre szerelhető készülék)

Légcsőmetszés:
Gége és a légcső szűkülete, elsősorban daganatos megbetegedések esetén alkalmazott eljárás.

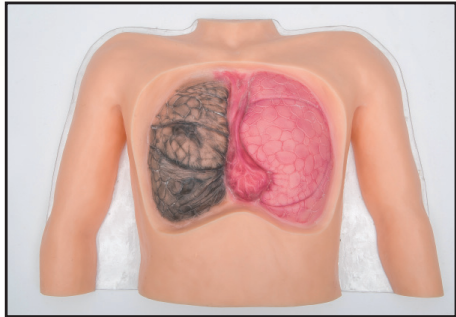


01-06-e
felsőtest/jobbs tüdő/beteg (tüdőrák),
bal tüdő/egészséges
Tüdőtágulat, tüdőrák:

A dohányzás bizonyítottan a légutak szerkezetének drámai romlásához, idült légcsőhuruthoz, a tüdő szövetének visszafordíthatatlan pusztulásához és tüdőtáguláshoz vezet. Tüdőtágulás esetén a tüdő nem tágul – sőt éppen ellenkezőleg – a tüdő léghólyagocskái felfúvódnak és szétszakadnak, a léghólyagocskák száma csökken. Ezáltal kisebb lesz a tüdő légzőfelülete és kapacitása.

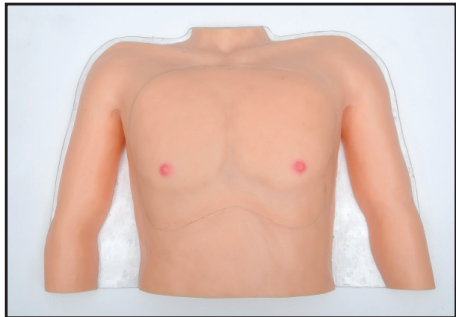


01-07
férfi mellkas/egészséges
(levehető rész, egészséges)

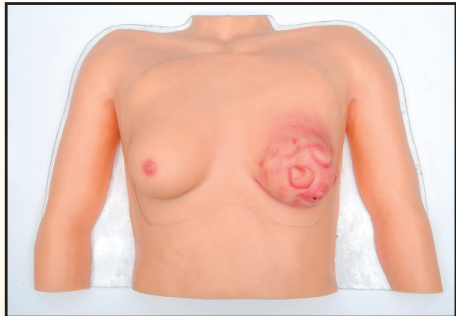

01-08-f
női mellkas/beteg
(levehető rész, mellrákos)

Daganatos megbetegedés (emlőrák, tüdőrák): A dohányzók körében tizenötször gyakrabban fordul elő tüdőrák, mely a leggyakoribb dohányzás okozta daganatos betegség. Dohányzó férfiaknál 18-szor, dohányzó nőknél 15-ször gyakrabban alakul ki a megbetegedés nemdohányzó társaikhoz képest. A dohányfüst hasonlóan fontos szerepet játszik a szájüregi- és a gégerák, a nyelöcső, a hasnyálmirigy és a húgyhólyag rosszindulatú daganatának kialakulásában is. A tartós dohányzás néhány kivételtől eltekintve valamennyi szerv esetében megnöveli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát.

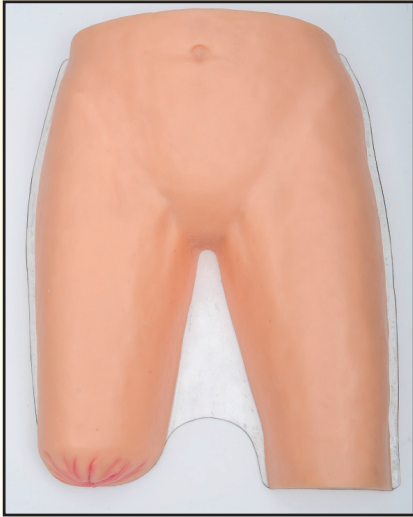

01-09
alsó test



01-10, 01-11
jobb kéz/egészséges
és bal kéz/egészséges




01-12-h/i/k
bal kéz/beteg
(csonkolt ujj+ráncosodás
+elszíneződ és a körmön)


Csonkolt végtagok: Súlyos mértékű üszkösödés következménye lehet az amputáció.

Elszíneződés: A rendszeres dohányzás következtében, a nikotin hatására elszíneződés figyelhető meg az ujjakon.

Ráncosodás: A bőr öregedése, ráncosodása természetes folyamat, azonban a dohányzás ezt a tendenciát szintén jócskán felgyorsítja. A dohányfüst kétféleképpen is károsítja a bőrt: egyrészt kívülről, közvetlen érintkezéssel, másrészt belülről, a bőr erein keresztül a belélegzett káros anyagok révén.

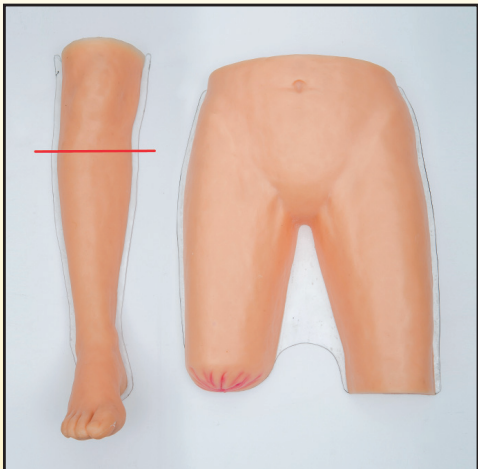

01-13-h
jobb láb (csonkolt végtag a térdnél)
Csonkolt végtagok:
Súlyos mértékű üszkösödés következménye lehet az amputáció.

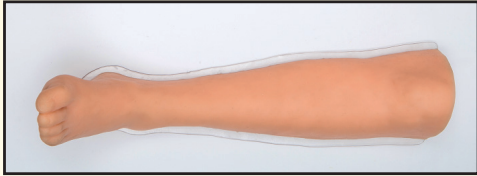

01-14
bal láb/egészséges



01-15-g/h/j
bal láb/beteg (pikkelysömör
+csonkolt lábujj+üszkösödés)

Pikkelysömör: A népesség legalább 1%-át érintő betegség, ami kóros elszarusodással, sok esetben ízületekre is kiterjed. A dohányzás kóros szerepe nem bizonyított, bár tanulmányokban azt találták, hogy a pikkelysömörrel súlytolt emberek között szignifikánsan több a dohányos.

Csonkolt végtagok: Súlyos mértékű üszkösödés következménye lehet az amputáció.

Üszkösödés: Perifériás erek szűkülete, melynek következtében a test szöveteinek pusztulása.



01-16
pénisz/egészséges



01-17/g
pénisz/beteg (pikkelysömör)

Impotencia:
Dohányzó férfiaknál gyakrabban alakul ki impotencia, mivel a nikotin, valamint a dohányfüst többi ártalmas összetevője - a dohányzás időtartamával és erősségével arányosan – károsítja a hímvesztő ereit.



01-18/I1
bőrdarab 1./beteg (bőrrák protézis)
Bőrrák: A melanoma a pigmentet termelő sejtekből kiinduló legritkább, de legveszélyesebb bőrdaganat. A betegség kialakulását elsősorban napfény vagy genetikai- alkati tényezők befolyásolhatják, de a kórlefolyás rosszabb a dohányosoknál.




01-19/I2
bőrdarab 2./beteg (bőrrák protézis)

TÁJÉKOZATÓ A BÁBU HASZNÁLATÁHOZ


A bábut tartalmazó doboz kinyitása, az egyes elemek kiemelése a tartódobozból és a bábu összeállítása:



1. A lezárt tartódobozt ezen a módon elhelyezve nyissuk ki a rajta lévő 2 db felpattintható rögzítő zár segítségével.

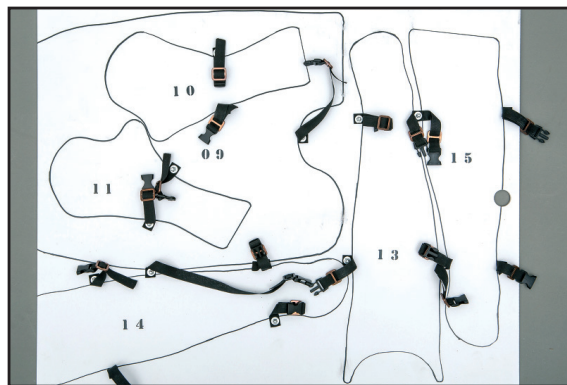


2. A tartódoboz fedelének felemelése után a benne található bábu testrészei egymásra helyezett 2 szinten helyezkednek el (1 db fehér színű, csatokkal és fekete körvonalakkal ellátott műanyag lapon (9150. kép beszúrása ide) található meg a testrészek egy része, valamint a doboz belsejének alsó részében, szintén csatokkal és fehér körvonalakkal ellátva található meg a többi testrész) 3 db fehér műanyag lappal elválasztva.

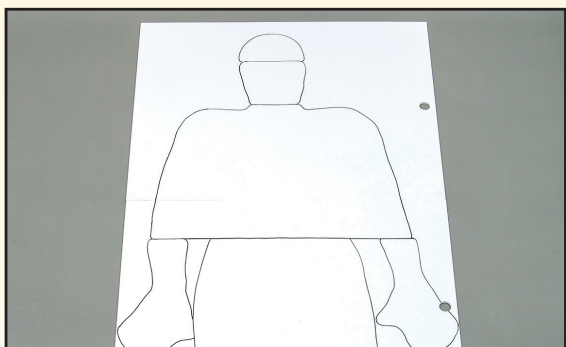

3. A 3 db fehér műanyag lapon – megfelelő sorrendben egymás mellé helyezve – a bábutest körvonalazódik ki, ezzel is segítve a bábu összeállítását. A bábu minden egyes testrészén fekete színű egyedi azonosítószám található a könnyebb beazonosíthatóság és kezelhetőség érdekében (pl. Az 1-es tartódobozban 01-01-től 01-19/I2-ig bezárólag, a 2-es tartódobozban 02-01-től 02-19/I2-ig bezárólag, stb.)



4. A csatokat kinyitva kiemelhető az adott testrész.

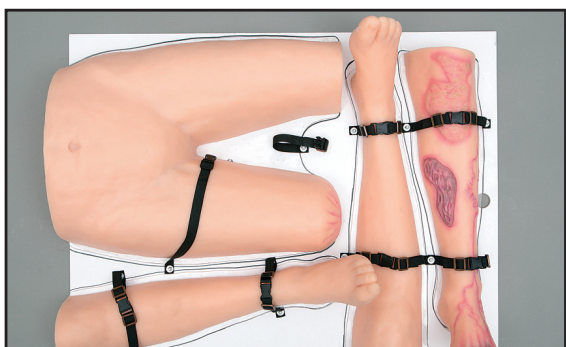

5. A testrészeket tartalmazó fehér színű lap óvatosan kiemelhető a tartódobozból a tartódoboz belsejének alsó szintjén elhelyezett testrészek kipakolása céljából




6. A tartódoboz alsó szintjén kis fekete lezárási dobozkában találhatóak a kisméretű testrészek: 1. egészséges pénisz 2. beteg pénisz 3. melanomás bőrdarabka I. 4. melanomás bőrdarabka II. 5. gégemetszés 6. (szemre helyezhető) szürkehályog




7. A csatokat kinyitva kiemelhető az adott testrész.




8. A női felsőtest (melldaganatot ábrázoló felsőtest-rész) felemelésével a beteg felsőtest belső része (tüdődaganatos rész) érhető el, amely alatt található berögzítve az egészséges férfi mellkasi rész. Ez a sorrend a bábu visszahelyezésekor is nagyon fontos, mert ebben a sorrendben kell visszakérülnie a testrészeknek!

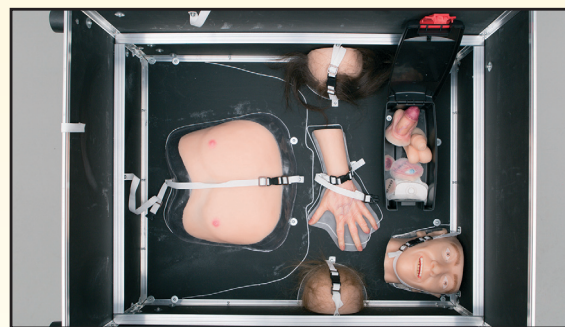


9. A csatokkal berögzített egészséges férfi mellkasi rész, amely egy átlátszó műanyagfelületen van tárolva a deformálódás elkerülése érdekében. Ez a bábu visszahelyezésekor is nagyon fontos, mert ugyanerre az elemre kell visszarakni a felső testrészt, a deformálódás elkerülése érdekében.

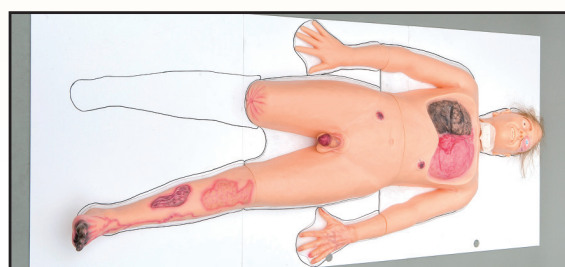

10. A fehér műanyag lapokon összeállított beteg férfi test

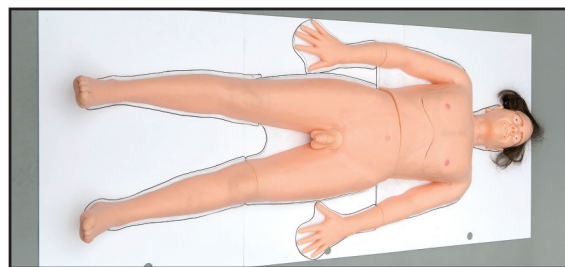


11. A fehér műanyag lapokon összeállított egészséges férfi test

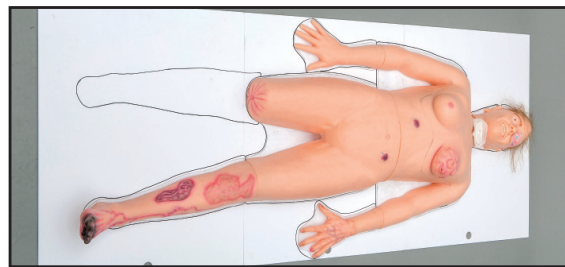

12. A fehér műanyag lapokon összeállított beteg női test


A bábu visszahelyezése a tartódobozba:

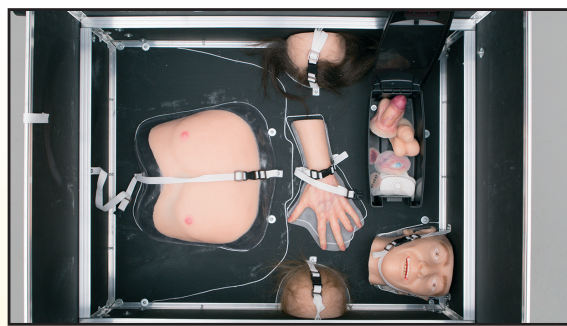

1. Az egyes testrészek visszahelyezése a kipakolás sorrendjével fordított módon történjen: azaz először az alsó szint és a benne lévő kis fekete lezárási dobozka tartalmának visszahelyezése (a dobozka lezárásával) történjen meg. A testrészeket a csatokkal minden esetben rögzítsük le megfelelően. Lényeges, hogy a fejrészek a képeken látható módon kerüljenek vissza a dobozba




2. A doboz alsó részében legalul található a berögzített egészséges férfi mellkasi rész, majd ezen helyezkedik el a beteg felsőtest belső része (tüdődaganatos rész), amely felett található a női felsőtest (melldaganatot ábrázoló felsőtest-rész), ez a sorrend nagyon fontos a megfelelő visszahelyezés érdekében!

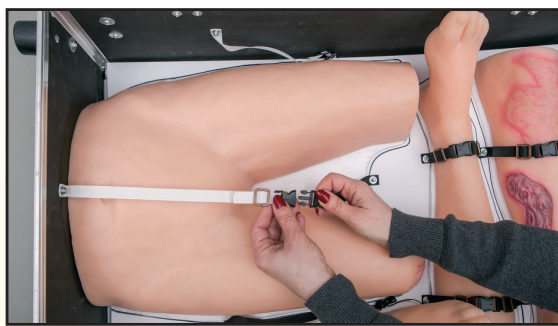

4. Az alsó szintre helyezük rá a 3 db fehér műanyag lapot ütközésig és ennek tetejére az előzőleg, a fehér körvonalas lapon összeállított felső szintet a csatos rögzítők használatával.



5. Zárjuk le a doboz fedelét a két rögzítő zár segítségével. Lehetőség szerint ebben a pozícióban tároljuk a dobozt, annak érdekében, hogy a benne található elemek ne deformálódjanak el idő előtt. Kérjük, hogy ne helyezzenek semmilyen eszközt vagy tárgyat a tartódobozra tárolás céljából! A tartódobozt kérjük száraz, tiszta helyen tárolni!

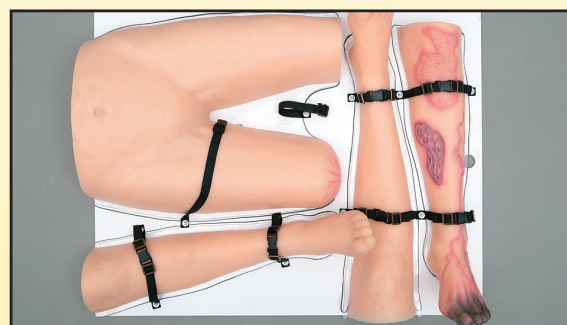

3. A fehér színű csatos műanyag lapra helyezzük vissza a megfelelő testrészeket a felrajzolt körvonalak és a testrészen jelölt egyedi azonosítószámok alapján. Lényeges itt, hogy a két egészséges kézfej az alsótest alatt helyezhető el!



6. A tartódoboz szállítását kihúzható kar és a dobozra szerelt görgők segítik, kérjük ezek rendeltetésszerű használatát a doboz sérülésének elkerülése érdekében!